

Folheto Informativo

V.02 - Out 2024.

NOME

COROA DE LIGA METÁLICA

Informações Gerais

Dispositivos médicos feitos por medida são fabricados de acordo com uma prescrição médica e são produzidos com características específicas para serem utilizados num determinado paciente sob responsabilidade do prescritor.

Uso do dispositivo

Utilizado para próteses dentárias definitivas sobre dente ou sobre implante, como reposição total ou parcial de estrutura dentária perdida. A sua utilização está limitada às condições legais de acordo com a norma do regulamento 2017/745, relativo à toxicidade e uso na cavidade oral. Aprovação e utilização de acordo com prescrição clínica.

Composição do Dispositivo

Dispositivo normalmente composto por liga metálica de titânio ou cobalto-cromo. Origem dos materiais e aprovação para uso na cavidade oral está de acordo com as normas legais.

Modo de Usar

A restauração do tipo coroa de liga metálica é feita por medida e específica para cada paciente.

Durante a manipulação do material, em caso de desgaste de superfície, não exceder a espessura mínima de 0,5 mm, podendo levar à fratura do mesmo.

Os materiais utilizados para o revestimento devem seguir as instruções de cada fabricante, desde que não comprometam a integridade e resistência do produto constituinte da restauração.(não ultrapassar a temperatura de fusão do material).

No caso de ser utilizado como infra-estrutura, deve proceder-se ao pre-tratamento da superfície dos metais, de acordo com as instruções do fabricante.